



PEDIATRIC LINE

儿童产品系列

儿童护理

儿童产品系列

儿童护理

儿童需要特殊设计的医疗产品。Aspen 深知于此，提供五个尺寸的儿童颈托，便于您提供高品质的患者护理。



五种尺寸选择

五个尺寸Aspen®儿童颈托, 选用得当时, 可适用所有儿童。*

颈托还配有一套替换垫。

*Vista®颈托适用于大龄儿童。



专为娇嫩皮肤设计

Aspen 儿童颈托设计在于保持活动限制的同时, 最大程度降低皮肤破损风险。专利的FlexTabs™弹性片能扩大接触面, 消除导致皮肤破损的“热点”。

柔和设计

衬垫使用透气的开孔泡沫制作, 带有柔软的低敏感型棉质内衬, 可以保持皮肤清洁、干爽和舒适。

个性化适合患者

背板上安装了一个枕骨支撑带, 通过调整, 可以在头部后侧形成个性化的支撑架。

有效的活动限制

Aspen 可以提供儿童和婴儿尺寸产品, 尺寸合适的颈托是提供有效活动限制的关键。

确认是否适合?



为便于确认是否适合和方便佩戴, 我们在魔术贴上印有以下三个事项。

① 看不见下颌部件上圆点?

下颌部件前部应和颌部前部齐平, 下颌能遮住下颌垫上的“圆点”标记。


② 魔术贴搭扣是否超过标记?

消除间隙。均匀并重复拉紧搭扣, 确保搭扣远端超过绿色标志, 使前板和后板重叠。

③ FlexTabs™是否弯曲?

如果颈托尺寸合适且安装牢固, 那么FlexTabs™弹性片将“受力”或弯曲以分散压力。注意: 绝对不得让内侧气管柱接触到喉部。

尺寸信息*

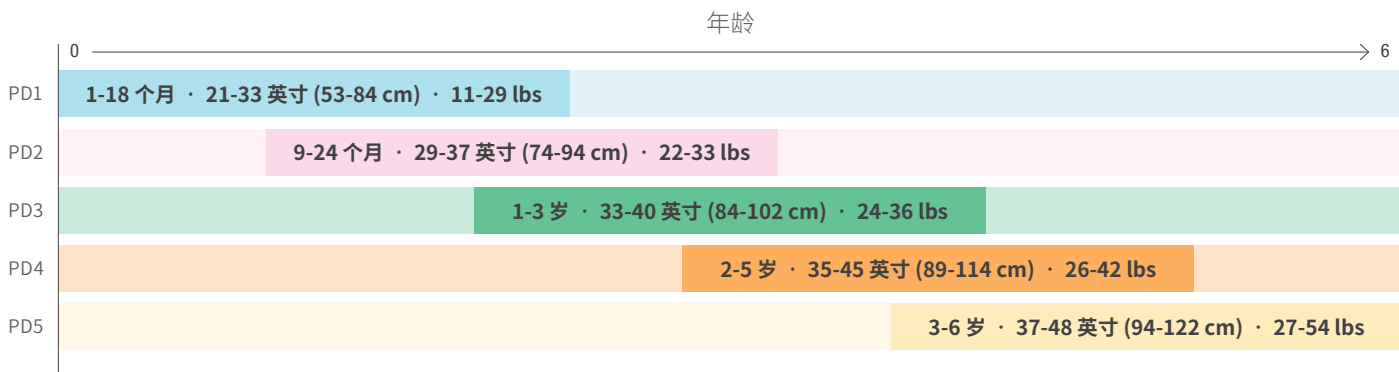

* 尺寸仅用于指导。每位患者都需要经过培训的医疗保健提供方量取尺寸，并评估是否适用。对于大龄儿童，Vista颈托最为合适。

产品信息

Aspen 儿童颈托	PD1	983190
	PD2	983195
	PD3	983106
	PD4	983102
	PD5	983104
Aspen 儿童颈托套件	带替换垫的 PD1 套件	983192
	带替换垫的 PD2 套件	983197
	带替换垫的 PD3 套件	983126
	带替换垫的 PD4 套件	983122
	带替换垫的 PD5 套件	983124
Aspen 儿童颈托背板	PD3, PD4, PD5背板 · 周长8.5-13英寸 (22-33 cm)	983116
Aspen 儿童CTO	CTO	983301
替换垫	PD1, PD换垫	983199
	PD3, PD4, PD换垫	983155