



Vista[®]
Lower Spine

独特设计 多样功能

Vista Lower Spine

展示最具创新的爱斯本产品系列
可调节Vista®薇斯塔下脊柱支具



Vista薇斯塔下脊柱系列代表了爱斯本创新能力的巅峰。公司在研发方面投入大量资源,生产出最为先进的下脊柱支护系统。对创新的追求直接转化为患者治疗预后的改善和依从性的提高。薇斯塔系列的模块化和全面型设计不仅简化了调节过程,更能提供优越的术后支撑,借助这一独特功能,患者可以随着病情的好转,将无用的部件拆除。

均码可调节

26-70 IN

舒适贴合 26 至 60 英寸的腰围,使用延展板后更能达到 70 英寸。创新的 Sure Slot™ 尺码调节系统使得一件支具可调成多种尺寸,保证每位患者都能享受最贴合的体验。最小库存,最省成本均码可调节意味着您总能找到正确的尺寸,这减少了库存需求,同时显著降低了成本。

最小库存,最省成本

均码可调节意味着您总能找到正确的尺寸,这减少了库存需求,同时显著降低了成本。



非弹性支具有助于控制下背部疼痛

研究显示,在改善躯干稳定性方面,非弹性腰部支具相比弹性支具更为有效,^{1,2}而躯干稳定性是缓解疼痛的关键因素。躯干稳定性的提高有助于减少肌肉的过度负荷,³从而显著缓解下背部疼痛。爱斯本支具采用非弹性设计,只为最大限度缓解您的疼痛。

1. Cholewicki J, Lee AS, Reeves NP, Morrisette DC. 《使用不同设计特点的腰骶支具造成的躯干僵硬对比》.《临床生物力学》.2010.
2. Cholewicki J, Reeves NP, Everding VQ, Morrisette DC. 《腰骶支具减少姿势控制任务中的躯干肌肉活动性》.《生物力学杂志》.2007.
3. van Dieen JH, Selen LPJ, Cholewicki J. 《下背部疼痛患者的躯干肌肉激活,文献分析》.《肌电图与运动机能学杂志》.2003.

集成型前板

支具两端的前板互相重叠，保证在中线处形成有效支撑。利用爱斯本创新的 FlexTab™ 技术，两块前板能够分散压力，并自然贴合不同病人的身体形态，达到最佳的舒适度。

多重背板选项

可拆卸背板提供了最佳的支撑和舒适度，能够满足每位患者的需要。

拆掉全部附件的
Vista 637 LSO
薇斯塔637 腰部支具

Sure Slot™ 系统

独具特色的尺寸调节系统，允许用户无需工具实现快速方便的调节。



Vista 637 薇斯塔 637 侧板

为需要额外支撑的患者提供更多两侧的支撑力。



可靠的结构稳定性

三带技术确保结构稳定，从而实现有效压缩和曲线贴合。

易于调节

所有结构性部件都能轻易拆除，或用热塑、弯折和修剪的方式进一步调整，以适应不同患者的情况。

符合人体工程学的牵拉把手

伸手即得，牵拉舒适。粘性结合配合缝合材料，保证稳定耐用。



高级非弹性压缩

爱斯本的 Super SlickTrack™ 系统能够分别对上下两侧进行收紧，对所需部位进行直接压缩，最大限度地缓解疼痛，而无需依赖患者自身力量。




Vista 464 TLSO 薇斯塔 464 高度调节

无需使用工具，薇斯塔 464 胸腰支具胸椎带的高度可在 13.7" 到 21.5" 之间进行调节，适应患者的不同体型。



薇斯塔 639 卓越支撑

搭配重叠侧板覆盖从耻骨联合到胸骨剑突的区域，提供卓越的灵活性与侧向控制力，实现腰部支具的最大支撑，同时不影响患者舒适度。

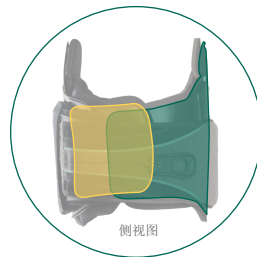

● 2 块侧板

● 前板

可调节，多功能

薇斯塔下脊柱系列产品经过独特设计，可自由拆卸，满足每位患者康复过程不同阶段所需的支撑力和运动限制力。



Vista 464 | Vista 639
薇斯塔 464 | 薇斯塔 639



Vista 637
薇斯塔 637



Vista 631
薇斯塔 631



Vista 627
薇斯塔 627

The Aspen Advantage

Aspen爱斯本医疗产品公司是市面上最好的脊柱护具生产商之一。对研发的积极投入使Aspen爱斯本产品具有无数的独特优势，这些优势均被冠以 Aspen Advantage 标志。这些优势让医师和患者获得了真正的益处。


另外，爱斯本支具有着 30 多年的临床使用历史，大量研究证明了爱斯本产品的安全、有效、舒适性。值得信赖、确有成效的高质量产品。这就是 Aspen Advantage。

 **Aspen Advantage 标志**
爱斯本独创的新颖功能

提供专家级调节选择

Aspen爱斯本脊柱支具经过独特设计，允许对各结构部件进行拆卸、修剪、弯折、热塑与组装，提供个性化的定制体验。健康专家可以对每副支具进行大幅度调节，从而医治不同患者的具体症状，支持不同的诊断治疗措施，适应不同的支具治疗理念或医嘱。坚固耐用的弹性部件由尼龙、高密度聚乙烯塑料及有色金属制成，具有极佳的支撑作用，允许进行大幅调节，而不会像劣质材料那样折断、变形或破裂。Aspen爱斯本支具能够进行大幅调节，从而进一步提高患者的治疗预后，修剪、弯折与热塑只是众多调节方式中的几种。

关于Aspen爱斯本护具如何大幅度调节的详细信息，或需要文档模板，请联络您当地的Aspen爱斯本销售代理，或访问 aspenmp.com/product-modifications。

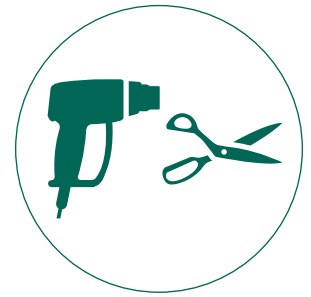

尺寸信息

26	腰围	60	70
26-60 英寸 (66-152 厘米)			至多 70 英寸 (178 厘米)
Vista薇斯塔下脊柱系列 均码可调节			薇斯塔下脊柱系列 延展板
Vista薇斯塔 464 颈胸支具 · Vista 薇斯塔 639 腰部支具 4 板 · Vista薇斯塔 637 腰部支具 · Vista薇斯塔 631 腰部支具 LoPro · Vista薇斯塔 627 腰托			增加 10 英寸 (25 厘米)

产品信息

Vista 薇斯塔下脊柱系列	Vista 464 TLSO薇斯塔 464 胸腰支具	993640
	Vista 639 LS0 4 Panel薇斯塔 639 腰部支具 4 板	993545
	Vista 637 LS0薇斯塔 637 腰部支具	993540
	Vista 631 LS0 LoPro薇斯塔 631 腰部支具 LoPro	993340
	Vista 627 Lumbar薇斯塔 627 护腰	993440
升级包	Vista薇斯塔 464 胸腰支具升级包 - 普通 · 胸椎带高度: 13.7-21.5 英寸 (35-55 厘米)	993644
	Vista薇斯塔 464 胸腰支具升级包 - 高 · 胸椎带高度: 15.2-23 英寸 (39-58 厘米)	993645
替换衬垫	Vista薇斯塔 464 胸腰支具替换衬垫	993642
	Vista薇斯塔 637 腰部支具/薇斯塔 631 腰部支具 LoPro 替换衬垫	993542
配件	Vista薇斯塔下脊柱延展板	993405
	治疗包	990005